

Tristel Duo™

OPH

High-Level-Desinfektionsschaum


FÜR WIEDERVERWENDBARE
TONOMETERKÖPFCHEN



Hinweise:

- Benutzen Sie den Schäumer nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Desinfizieren Sie die Hände und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn Sie mit Desinfektionsmitteln oder Medizinprodukten hantieren.
- Entfernen und entsorgen Sie die Transportsicherungen, die verhindern, dass der Schäumer auf dem Transportweg gedrückt wird.
- Bei der erstmaligen Benutzung drücken Sie den Schäumer zwei- bis viermal, um ihn zu justieren.
- Falls die Oberfläche sichtlich verschmutzt ist, befolgen Sie die Standardarbeitsanweisung hinsichtlich der Reinigung.
- Nur für den professionellen Gebrauch.

SCHRITT 1

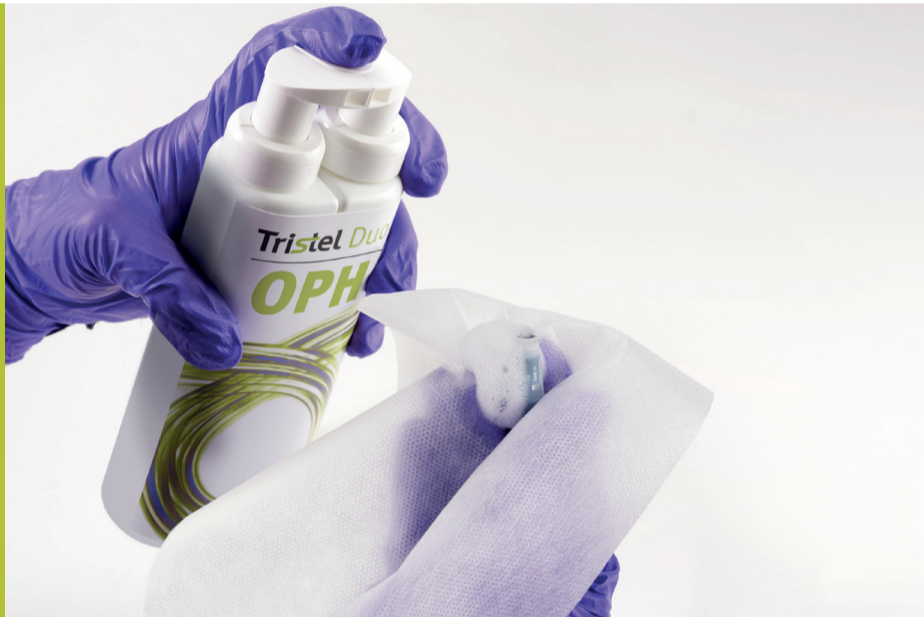

Geben Sie 2 vollständige Hübe Tristel Duo auf ein geeignetes Tuch (z.B. Tristel Dry Wipes) oder direkt auf das Tonometerköpfchen.

SCHRITT 2



Stellen Sie sicher, dass alle Flächen des Tonometerköpfchens ausreichend benetzt werden. Nutzen Sie ggf. weitere Hübe Duo.

Hinweise: Anhaltendes Wischen der Oberfläche ist nicht erforderlich und sollte unterlassen werden, um ein Auseinanderreißen des Tuches zu vermeiden. Führen Sie genutzte Tücher gemäß den lokalen Bestimmungen dem Abfall zu. Sie sind nicht zur mehrmaligen Verwendung geeignet.

SCHRITT 3



Lassen Sie die Oberfläche trocknen, um eine Mindesteinwirkzeit von **30 Sekunden** sicherzustellen.

SCHRITT 4



Spülen Sie das Instrument mit Wasser geeigneter Qualität.

Hinweise: Lagern Sie das Medizinprodukt gemäß der Standardarbeitsanweisung, um Beschädigungen oder Rekontaminationen zu vermeiden.

Tristel™

Erstellt von: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Vertrieb: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226 - F +49 (0)30 54819232 - E berlin@tristel.com

Informationen zu Tristels Patenten unter: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-465-1
March 2018